



EINFÜHRUNG DES INTRAAORTALEN BALLONKATHETERS KURZANLEITUNG FÜR LINEAR® 7,5Fr. UND MEGA™ 8Fr.


EINFÜHRUNG DES IAB-KATHETERS

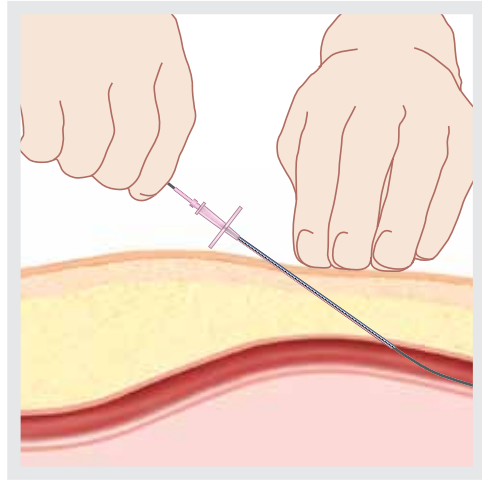

1 Der Einführungswinkel sollte 45° nicht überschreiten.

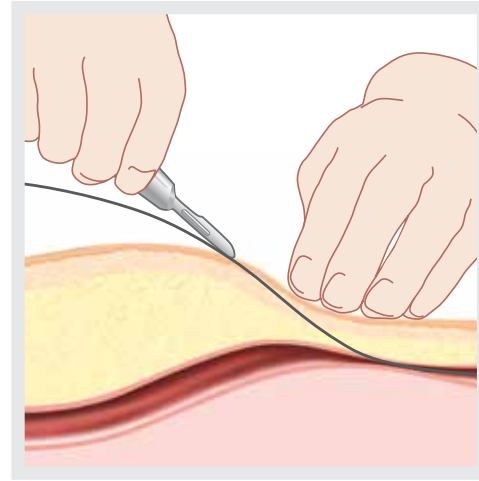


2 Nehmen Sie eine kleine Inzision an der Austrittsstelle des Führungsdrahtes vor.

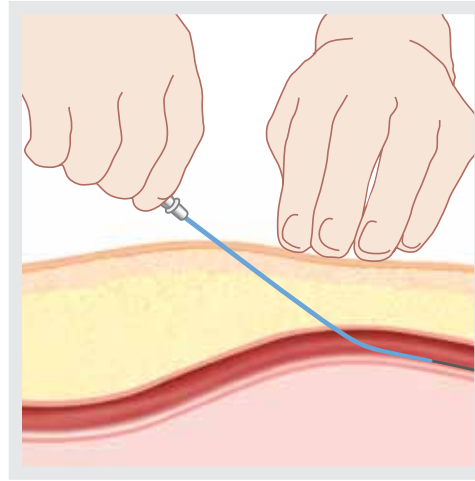


3 Führen Sie den Gewebedilatator mit dem schmaleren Ende zuerst über den Führungsdraht ein.


VORBEREITUNG DES IAB-KATHETERS

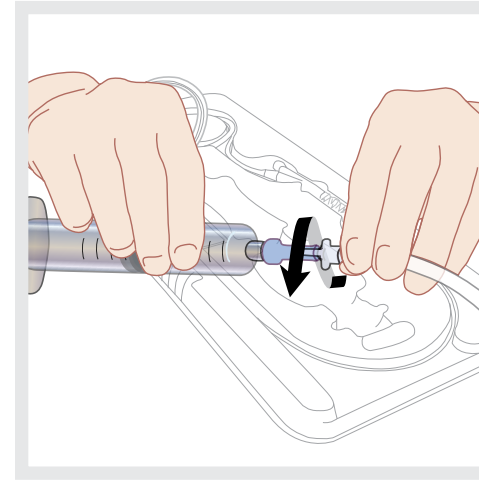

4 Drücken Sie das Einwegventil fest auf den männlichen Luer-Anschluss des IAB-Katheters und drehen Sie ihn anschließend weiter bis zur Verankerung.

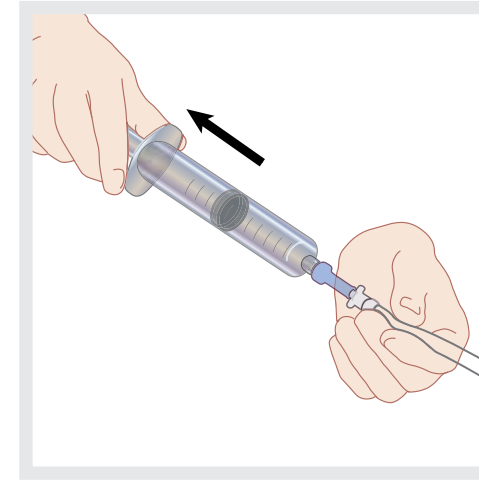


5 Ziehen Sie mit der mitgelieferten 30-ml-Spritze 30ml Luft ab, damit ein Vakuum entsteht.

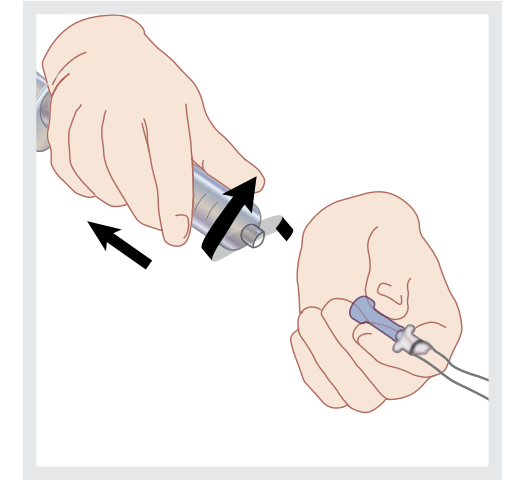


6 Drehen Sie die Spritze und nehmen Sie sie ab; das Einwegventil bleibt dabei am männlichen Luer-Anschluss des IAB-Katheters befestigt.


SCHLEUSENLOSE EINFÜHRUNG

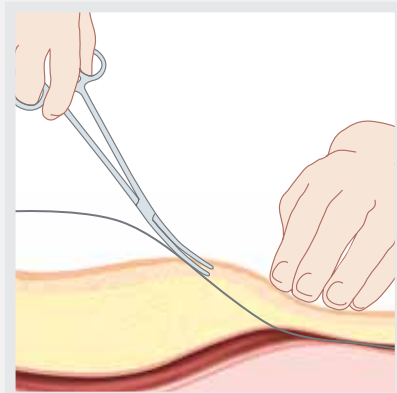


7 Straffen Sie das Unterhautgewebe vorsichtig, um die schleusenlose Einführung zu erleichtern.

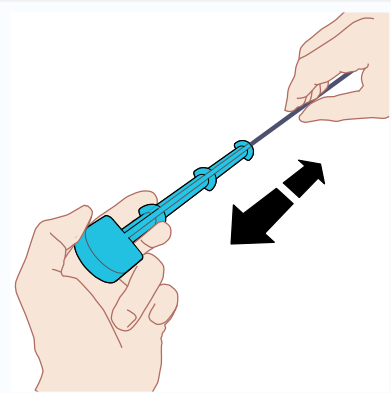

8 Entfernen Sie den IAB-Katheter vom Quergriff, indem Sie ihn GERADE herausziehen, damit er nicht beschädigt wird.

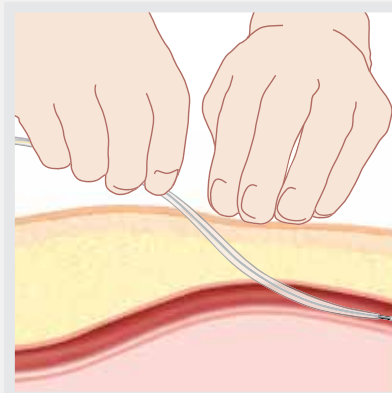


9 Schieben Sie den IAB-Katheter über den Führungsdraht in kürzen Schüben in die Arterie vor, bis er korrekt sitzt.

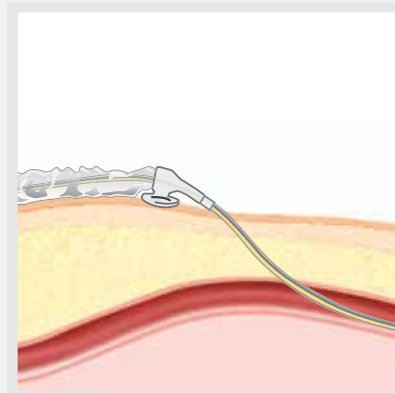


10 Schieben Sie den Schleusenverschluss so nahe wie möglich an die Einführungsstelle heran und befestigen Sie den IAB-Katheter am Bein des Patienten.


EINFÜHRUNG MIT SCHLEUSE

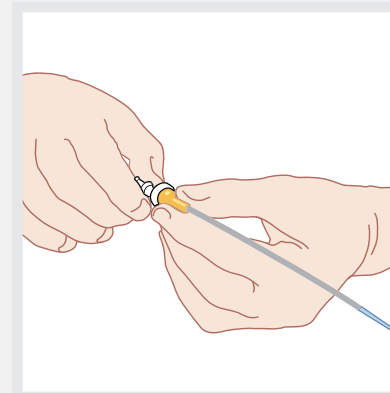


7 Schieben Sie den Einführungsdilator in das Anschlussstück der Schleuse ein und befestigen Sie ihn.

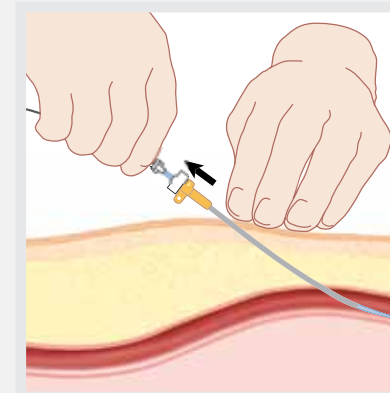

8 Schieben Sie die Schleuse mit einer Drehbewegung über den Führungsdraht in die Arterie vor. Ziehen Sie den Dilator heraus und belassen Sie die Schleuse in Position.

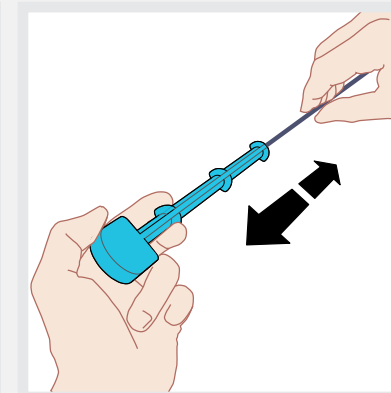


9 Entfernen Sie den IAB-Katheter vom Quergriff, indem Sie ihn GERADE herausziehen, damit er nicht beschädigt wird.

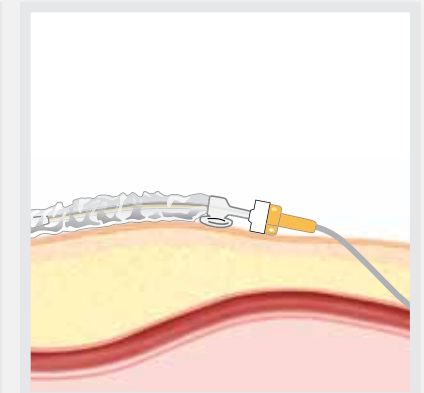


10 Schieben Sie den IAB-Katheter in kürzen Schüben durch die Schleuse in die Arterie vor, bis er korrekt sitzt. Schieben Sie den Schleusenverschluss in das Anschlussstück der Schleuse und befestigen Sie den IAB-Katheter am Bein des Patienten.


DRUCKÜBERWACHUNG

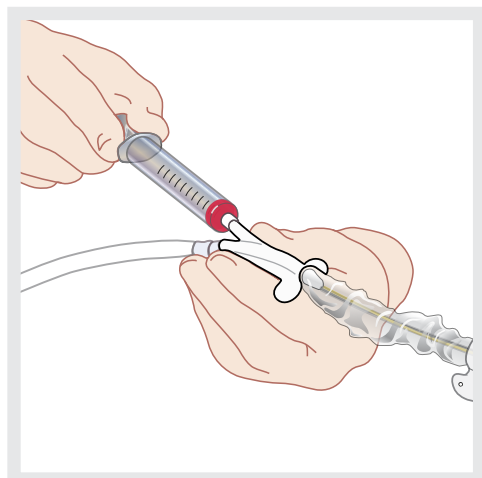

11 Entfernen Sie den Führungsdraht und aspirieren Sie 3ml Blut aus dem Innenlumen.

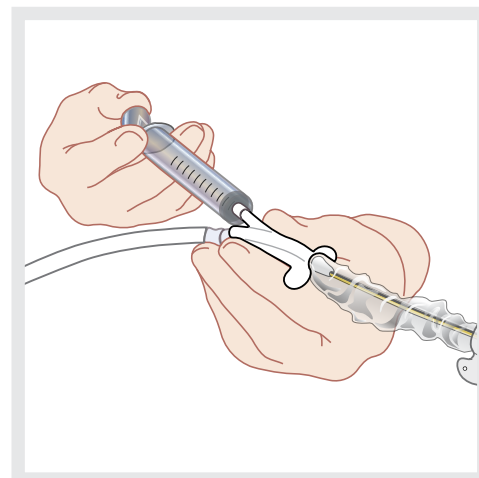


12 Spülen Sie das Innenlumen manuell mit 3-5ml Spüllösung.

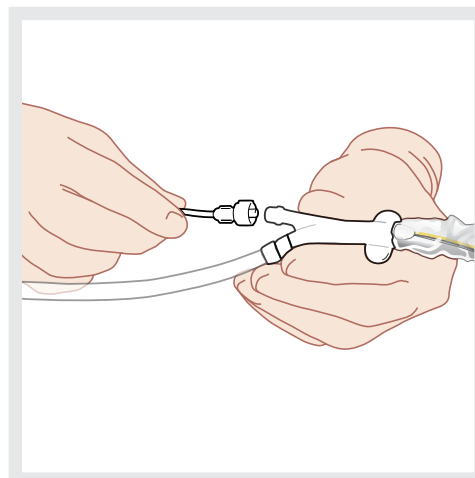


13 Schließen Sie ein Standard-Druckspülssystem zur Überwachung des arteriellen Drucks an.


ANSCHLUSS AN DIE IABP

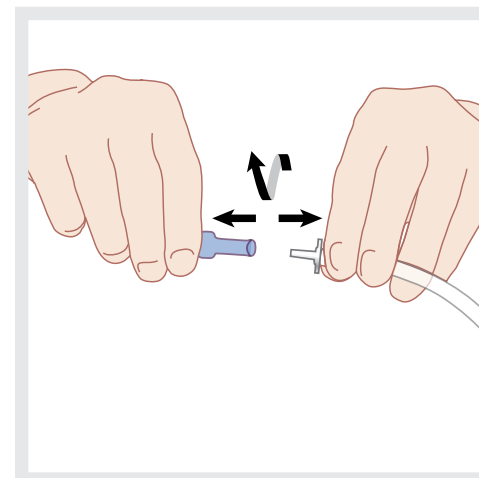

14 Drehen Sie das Einwegventil und ziehen Sie es vom IAB-Katheter ab.

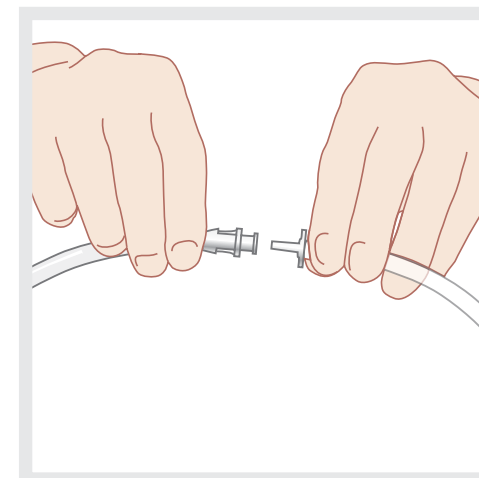

15 Schließen Sie den männlichen Luer-Anschluss des IAB-Katheters an den weiblichen Luer-Anschluss der Katheterverlängerung an.

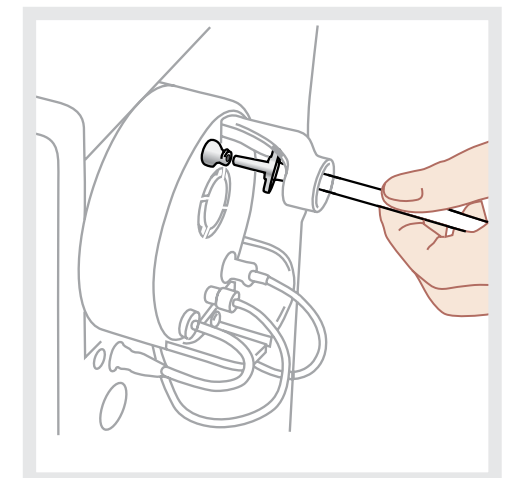

16 Schließen Sie den männlichen Luer-Anschluss der Katheterverlängerung an die Sicherheitsdisk der IAB-Pumpe an.

AUSWAHL DER RICHTIGEN GRÖSSE DES INTRAAORTALEN BALLONS

Diese Anleitung dient als Bezugsmaterial für das bereits in der Verwendung der MAQUET IAB-Katheter geschulte Personal. Diese Anleitung sollte erst nach gründlicher Lektüre der im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Hinweis: Diese Informationen sind nur als Leitfaden gedacht. Bei der Auswahl der geeigneten IAB-Kathetergröße sollten stets klinische Informationen und patientenbezogene Faktoren (z. B. Torsollänge) berücksichtigt werden.

