

**SAFEGUARD® 12cm**


**METHODE FÜR DIE HERBEIFÜHRUNG UND  
AUFRECHTERHALTUNG DER HÄMOSTASE**

**CARDIOVASCULAR**



**Überlassen Sie SAFEGUARD die Arbeit!**

SAFEGUARD ist ein vielseitiger Druckverband zur Behandlung der Punktionsstelle, der Ihnen dabei hilft, die Hämostase herbeizuführen und aufrechtzuerhalten. SAFEGUARD vereinfacht die Behandlung der Punktionsstelle vor und nach Erreichen der Hämostase. Er reduziert die Anforderungen an das Pflegepersonal, maximiert wertvolle Ressourcen und verbessert den Komfort der Patienten.

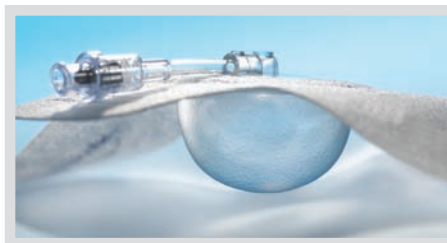

*Maximales Luftvolumen: 7ml*

Datascope Corp.  
Cardiac Assist  
15 Law Drive  
Fairfield, NJ 07004  
Telefon: +1 800 777 4222

MAQUET Vertrieb und Service  
Deutschland GmbH  
Kehler Straße 31  
D-76437 Rastatt,  
Telefon: +49 (0) 7222 932-1200  
Fax: +49 (0) 7222 932-19-1200  
<http://ca.maquet.com>

## GRÜNDE FÜR DIE VERWENDUNG DES SAFEGUARD 12cm

### SAFEGUARD 12cm verbessert den Komfort der Patienten

- Schränkt die Bewegungsfreiheit der Patienten nicht ein
- Keine unbequemen Riemen oder Bänder

### SAFEGUARD 12cm ist einfach in Gebrauch und Anwendung

- Entspricht dem Standardkrankenhausprotokoll
- Vier einfache Schritte

### SAFEGUARD 12cm übt Druck ohne manuelles Eingreifen aus

- Schützt die Punktionsstelle mit gleichmäßigem Druck
- Ist vielseitig einsetzbar und kann als Druckverband zum Schutz der Punktionsstelle verwendet werden


### SAFEGUARD für die Aufrechterhaltung der Hämostase

- Das durchsichtige Fenster des SAFEGUARD ermöglicht dem Anwender die Beurteilung der Punktionsstelle, ohne dass der Verband entfernt werden muss
- Ideal für Sickerblutungen


### SAFEGUARD 12cm Druckübersicht<sup>1</sup>

ml Luft	durchschnittl. Kraft	maximale Kraft	minimale Kraft
0	0,327 kg	0,553 kg	0,05 kg
3	0,939 kg	1,256 kg	0,603 kg
5	2,014 kg	2,463 kg	1,610 kg
7	4,105 kg	4,681 kg	3,57 kg


## ANWENDUNGSVERFAHREN

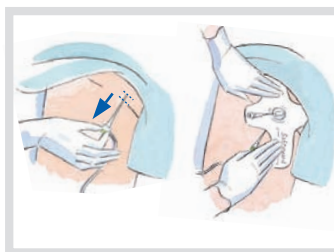

1. Anbringen

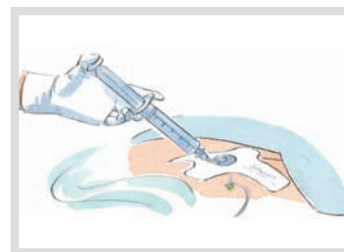

2. Inflatieren

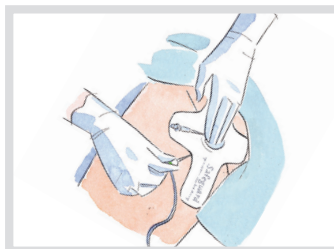

3. Druck ausüben



4. Deflatieren

### Bestellinformationen unter +49 (0) 7222 932 1200

Beschreibung	Artikelnr.
SAFEGUARD 12cm (10 pro Karton)	82050

<sup>1</sup> Jeder Probensatz enthält 10 Einheiten  
Diese Messungen wurden auf einer Metallplatte durchgeführt; Werte bei Menschen können deshalb abweichen.  
Haut und Muskeltonus können die einwirkende Kraft beeinflussen.

