



# INSERIMENTO DEL CATETERE DA CONTROPULSAZIONE AORTICA

## GUIDA BREVE PER LINEAR® 7.5Fr. E MEGA™ 8Fr.


### INSERIMENTO DEL CATETERE

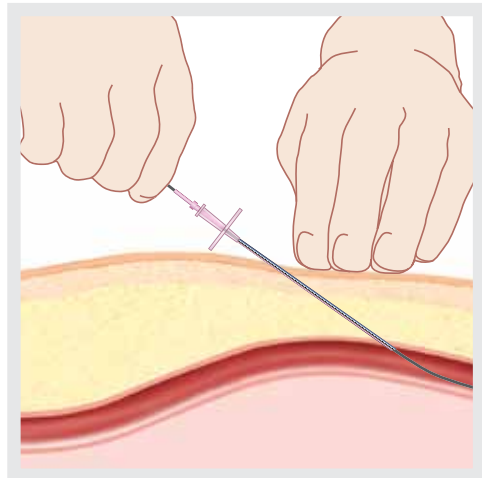

**1** L'angolo di inserimento dovrebbe essere di 45° o inferiore.

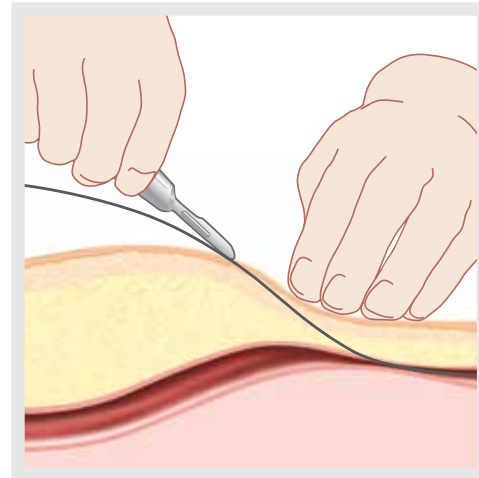


**2** Eseguire una piccola incisione nel punto di uscita del filo guida.

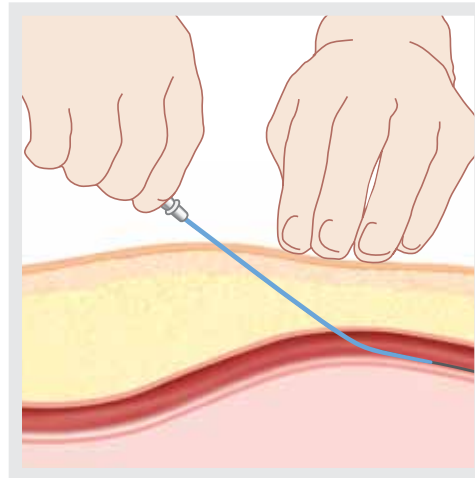


**3** Inserire il dilatatore vasale sopra al filo guida, iniziando dall'estremità conica.


### PREPARAZIONE DEL CATETERE

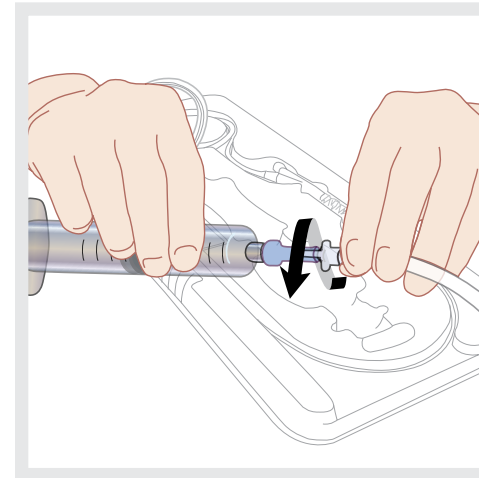

**4** Spingere e ruotare per collegare saldamente la valvola ad una via al raccordo luer maschio del catetere da contropulsazione.

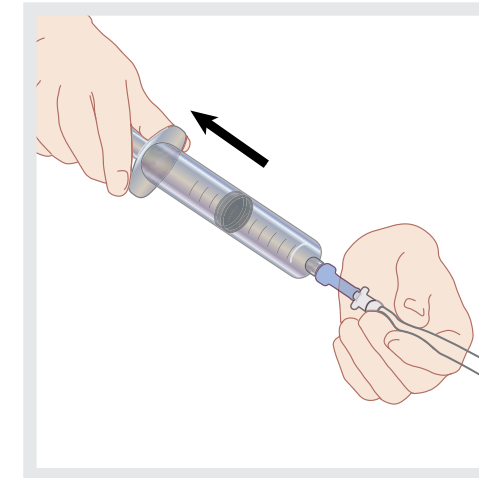


**5** Utilizzando la siringa da 30ml in dotazione creare al suo interno un vuoto di 30ml d'aria.

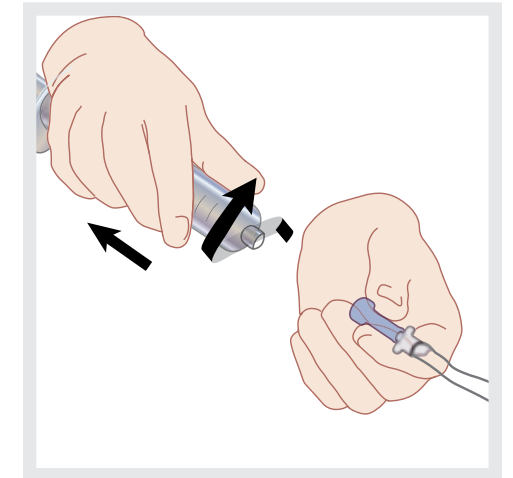


**6** Ruotare e rimuovere la siringa, lasciando la valvola ad una via collegata al raccordo luer maschio del catetere da contropulsazione.


### PER INSERIMENTO SENZA INTRODUTTORE

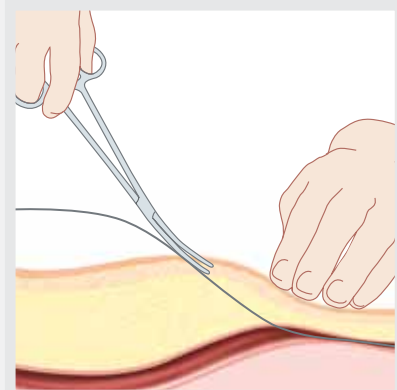


**7** Distendere accuratamente il tessuto sottocutaneo per facilitare l'inserimento senza introduttore.

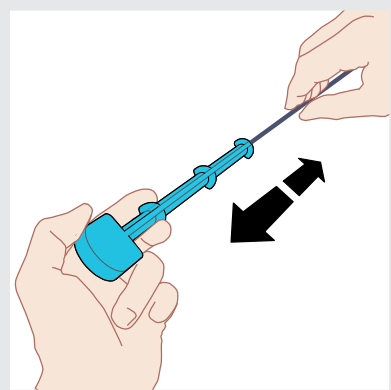

**8** Staccare il catetere da contropulsazione dall'impugnatura a T estraendolo DIRITTO per evitare di danneggiarlo.

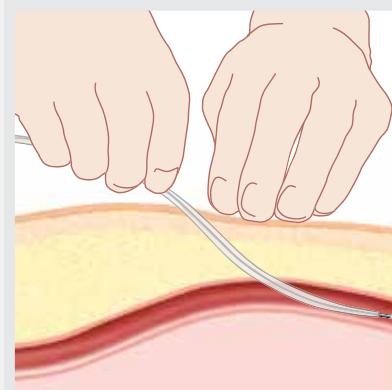


**9** Fare avanzare il catetere sul filo guida nell'arteria con tocchi brevi fino ad un corretto posizionamento.

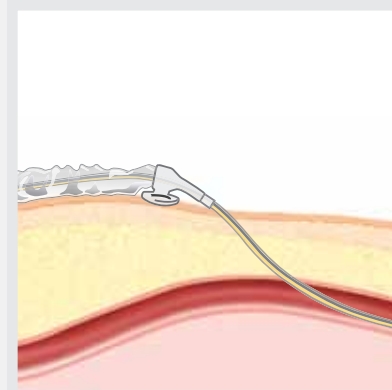


**10** Fare avanzare la guarnizione di tenuta quanto più possibile vicino al sito di inserimento e assicurare il catetere alla gamba del paziente.


### PER INSERIMENTO CON INTRODUTTORE

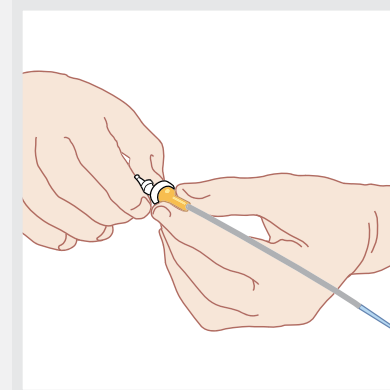


**7** Inserire il dilatatore dell'introduttore nel corpo centrale e assicurarli.

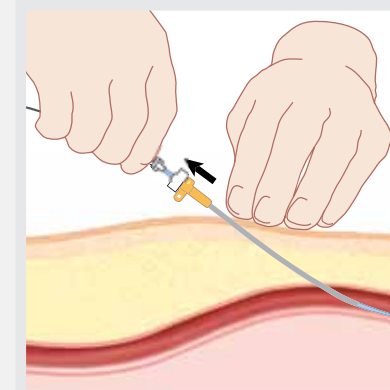

**8** Fare avanzare l'introduttore sul filo guida nell'arteria utilizzando un movimento rotatorio. Estrarre il dilatatore lasciando l'introduttore in posizione.

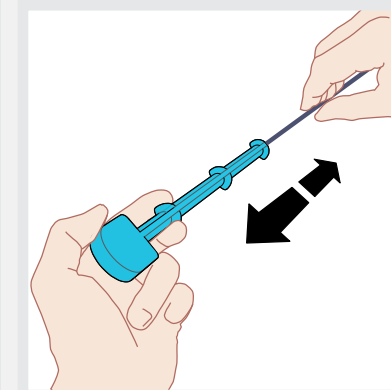


**9** Staccare il catetere da contropulsazione dall'impugnatura a T estraendolo DIRITTO per evitare di danneggiarlo.

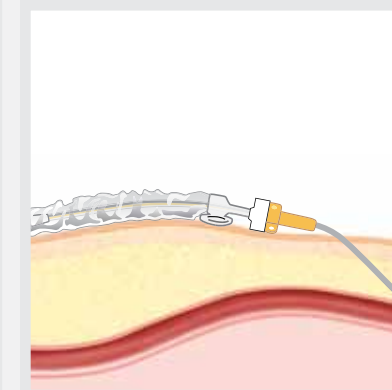


**10** Avanzare il catetere nell'arteria attraverso l'introduttore con tocchi brevi fino ad un corretto posizionamento. Spingere la guarnizione di tenuta nel corpo centrale del catetere ed assicurare il catetere da contropulsazione alla gamba del paziente.


### INSTALLAZIONE MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE

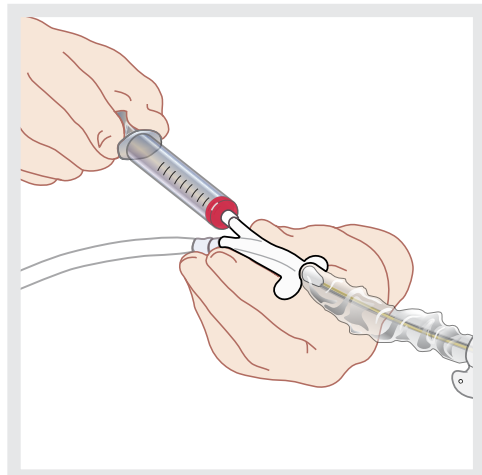

**11** Rimuovere il filo guida e aspirare 3ml di sangue dal lume interno.

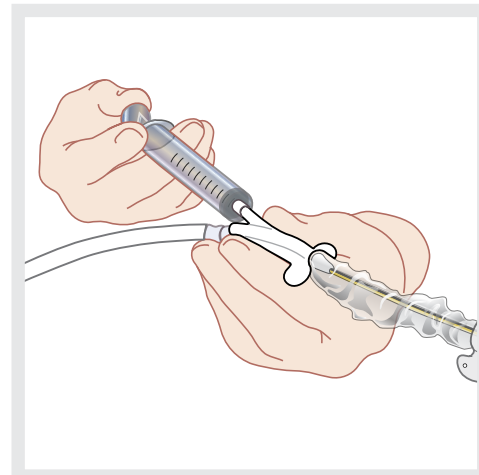


**12** Eseguire un'irrigazione manuale del lume interno con 3-5ml di soluzione per irrigazione.

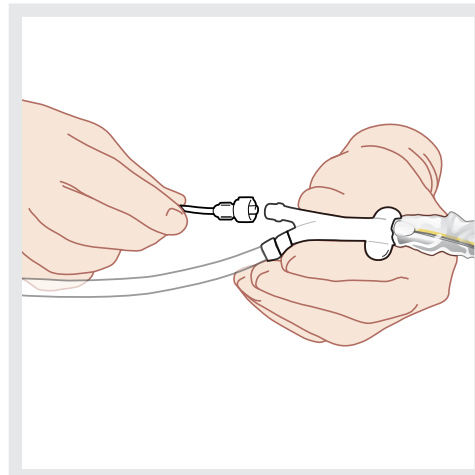


**13** Collegare un dispositivo standard per il monitoraggio della pressione arteriosa.


### COLLEGAMENTO ALLA CONTROPULSAZIONE AORTICA

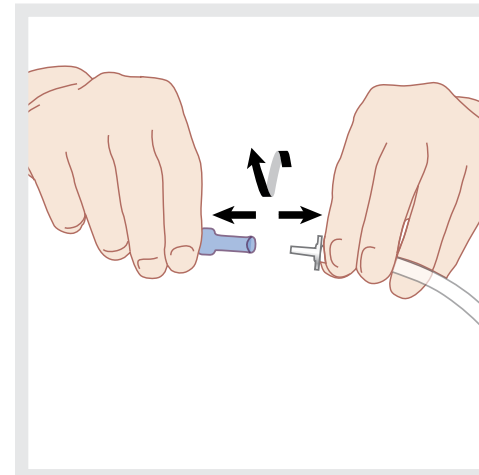

**14** Ruotare e tirare per rimuovere la valvola ad una via dal catetere da contropulsazione.

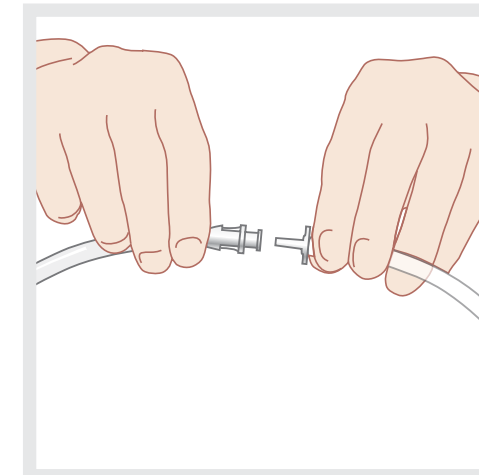

**15** Collegare il raccordo maschio luer del catetere al raccordo femmina luer della prolunga del catetere.

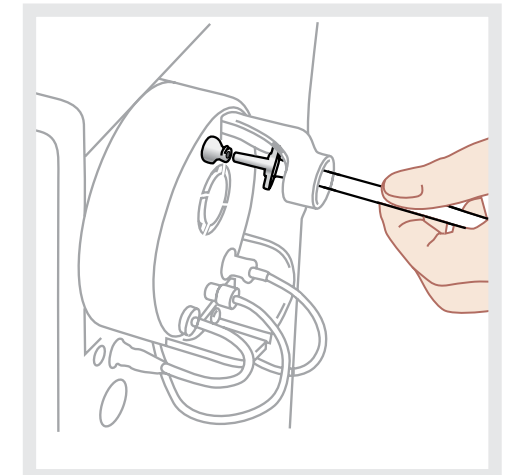

**16** Collegare il raccordo maschio luer della prolunga del catetere al disco di sicurezza della pompa da contropulsazione aortica.

Datascope Cardiac Assist  
15 Law Drive  
Fairfield, NJ 07004  
Tel: +1 973 244 6100

Visitare il sito Web:  
<http://ca.maquet.com>

### PALLONCINO INTRA-AORTICO

#### GUIDA ALLE DIMENSIONI

La presente guida è un riferimento per il personale formato per l'uso dei cateteri da contropulsazione MAQUET. Non utilizzare la presente guida prima di aver letto per intero le istruzioni per l'uso accluse.

**Nota:** Usare queste informazioni solo come guida orientativa. Nella selezione delle giuste dimensioni del palloncino, dovranno essere considerati le informazioni cliniche e i fattori specifici del paziente (ad es. la lunghezza del tronco).

