


SAFEGUARD® 12cm
TECNICA PRE E POST-EMOSTASI

CARDIOVASCULAR



**Lasciate che SAFEGUARD faccia
il Vostro lavoro!**

Safeguard è un dispositivo versatile per la gestione del sito di accesso che vi assisterà nell'ottenere e mantenere l'emostasi. SAFEGUARD semplifica la gestione pre e post-emostasi del sito di accesso. Riduce le esigenze di personale, ottimizza le risorse necessarie e aumenta il comfort del paziente.

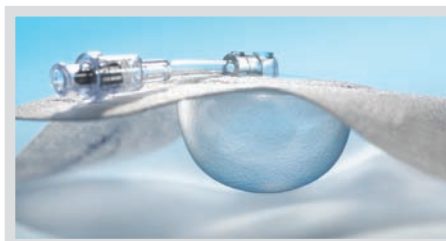

Volume massimo dell'aria: 7cc

PERCHÉ USARE SAFEGUARD 12cm?

SAFEGUARD 12cm offre maggiore comfort per il paziente

- Non limita i movimenti del paziente
- Nessuna cinghia o fascia scomoda

SAFEGUARD 12cm è facile da usare e semplice da applicare

- Segue il protocollo ospedaliero di routine
- Quattro semplici azioni

SAFEGUARD 12cm offre pressione a mani libere

- Protegge il sito di accesso con una pressione costante
- È versatile e può essere utilizzato come una medicazione a pressione per proteggere il sito


SAFEGUARD per mantenere l'emostasi

- La finestra trasparente del dispositivo SAFEGUARD consente al personale di accedere facilmente al sito senza dover rimuovere il dispositivo
- Ideale per i siti con gemizio


Grafico di riferimento della pressione per SAFEGUARD 12cm¹

ccd'aria	Forza media	Forza massima	Forza minima
0	0,72 libbre	1,22 libbre	0,11 libbre
3	2,07 libbre	2,77 libbre	1,33 libbre
5	4,44 libbre	5,43 libbre	3,55 libbre
7	9,05 libbre	10,32 libbre	7,87 libbre


TECNICA DI APPLICAZIONE

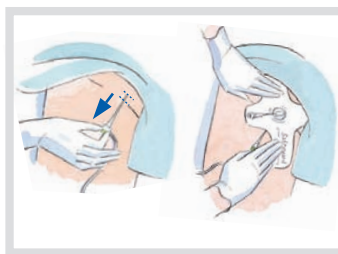

1. Applicare

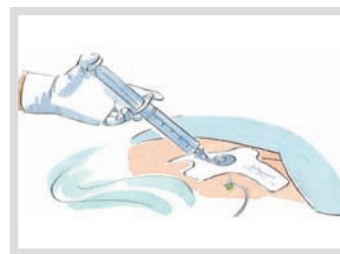

2. Gonfiare

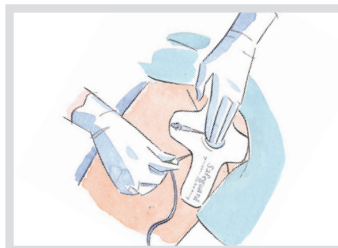

3. Comprimere



4. Sgonfiare

Per informazioni sull'ordinazione chiamare il numero +1 800 777 4222

Descrizione	N. parte
SAFEGUARD 12cm (10 per scatola)	82050

¹ 10 unità sono state incluse in ogni campione
Queste misurazioni sono state effettuate su una piastra di metallo; quindi l'utilizzo su tessuti umani può variare.
La cute e il tono muscolare possono influenzare la forza fornita

