

**SAFEGUARD® 24cm**  
**TECNICA MANUALE ASSISTITA,**  
**TECNICA PRE E POST-EMOSTASI**

CARDIOVASCULAR



**SAFEGUARD è pressione e la pressione funziona!**

Lasciate che SAFEGUARD Vi aiuti ad ottenere e mantenere l'emostasi. "La Tecnica di assistenza manuale SAFEGUARD" (SMAT) dimostra con test clinici che SAFEGUARD 24cm è sicuro ed efficace nel ridurre i tempi di compressione attivi nell'incannulazione dell'arteria femorale a seguito di procedure diagnostiche ed interventistiche. SAFEGUARD semplifica la gestione pre e post-emostasi del sito di accesso. Riduce le esigenze di personale, ottimizza le risorse necessarie ed aumenta il comfort del paziente.

**Riduce il tempo di compressione attivo<sup>1</sup>**

	Diagnostica	Interventistica
Tempo di compressione attivo (minuti)	5	10
Tempo di compressione passivo (minuti)	120	240
Tempo di compressione totale (minuti)	125	250

## PERCHÉ USARE SAFEGUARD 24cm?

### SAFEGUARD offre pressione meccanica a mani libere

- Riduce i tempi di compressione attivi
- Mantiene la pressione durante il trasporto del paziente senza la necessità di supporti ascellari o di personale
- Fornisce al sito di accesso una pressione costante rispetto alla compressione manuale che può variare a seconda del medico

### SAFEGUARD è facile da usare e semplice da applicare

- Nessuna protocollo o attrezzatura complicata da gestire
- Richiede un solo operatore e un'unica siringa standard luer lock
- Quattro semplici azioni


### SAFEGUARD per mantenere l'emostasi

- Ideale per pazienti non collaboranti
- La finestra trasparente del dispositivo SAFEGUARD consente al personale di accedere facilmente al sito senza dover rimuovere il dispositivo
- Una volta che l'emostasi è stata raggiunta, SAFEGUARD può essere utilizzato per il gemizio e dopo la rimozione del IABP

### Grafico di riferimento della pressione per SAFEGUARD 24cm<sup>2</sup>

cc d'aria	Forza media	Forza massima	Forza minima
0	0,12 libbre	0,24 libbre	0,09 libbre
20	4,89 libbre	6,93 libbre	0,74 libbre
30	11,59 libbre	14,85 libbre	8,83 libbre
40	18,74 libbre	22,55 libbre	15,20 libbre

## TECNICA DI APPLICAZIONE

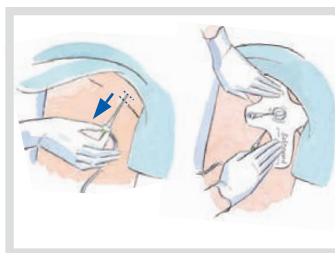

1. Applicare



2. Gonfiare



3. Comprimere



4. Sgonfiare

### Per informazioni sull'ordinazione chiamare il numero +1 800 777 4222

Descrizione	N. parte USA	N. parte Internazionale
SAFEGUARD 24cm (10 per scatola)	82000D	82000

<sup>1</sup> Dati d'archivio; test multicentrico della Tecnica di assistenza manuale SAFEGUARD.

<sup>2</sup> 10 unità sono state incluse in ogni campione. Queste misurazioni sono state effettuate su una piastra di metallo; quindi l'utilizzo su tessuti umani può variare. La cute e il tono muscolare possono influenzare la forza fornita.

