



# INSERCIÓN DEL CATÉTER CON BALÓN INTRA-AÓRTICO

## GUÍA RESUMIDA DE LINEAR® 7,5Fr. Y MEGA™ 8Fr.


### INSERCIÓN DEL CATÉTER BIA

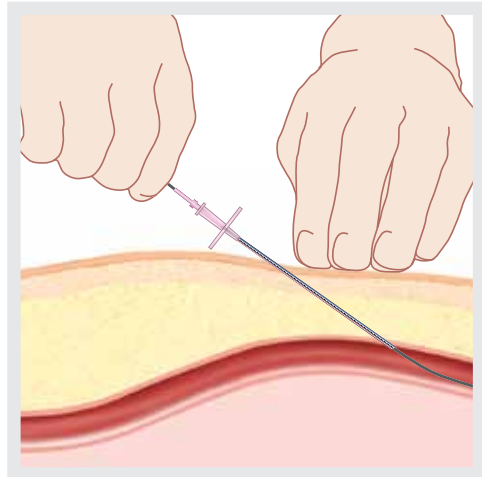

**1** El ángulo de inserción debe ser de un máximo de 45°.

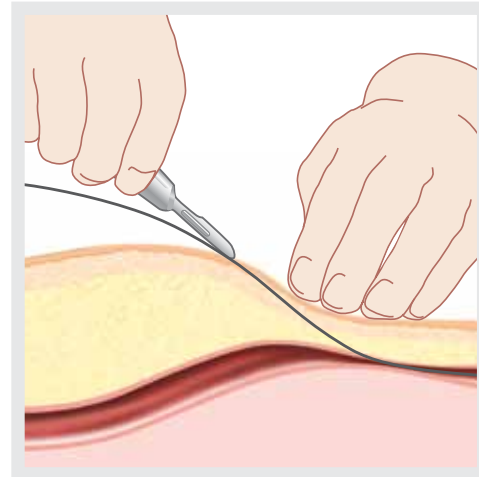


**2** Realice una pequeña incisión en la salida de la guía.

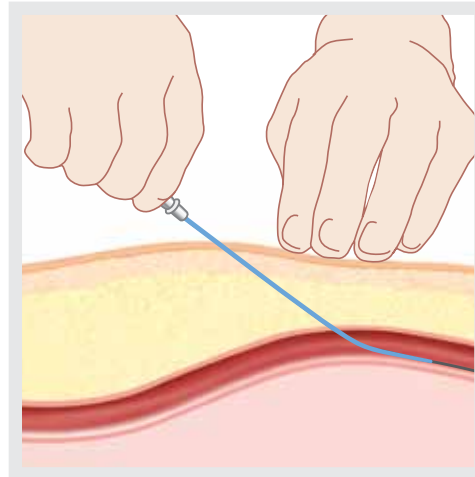


**3** Introduzca el dilatador a través de la guía, comenzando por el extremo ahusado.


### PREPARACIÓN DEL CATÉTER BIA.

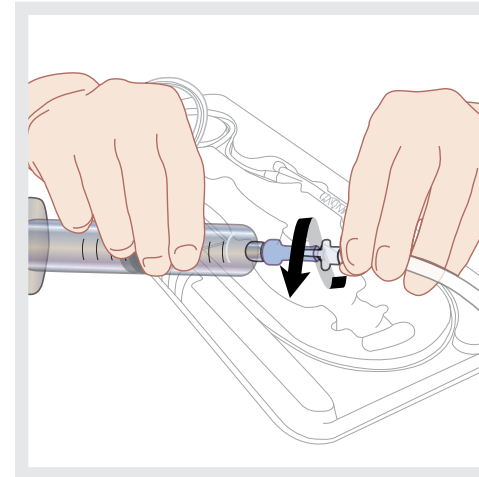

**4** Empuje y gire para para ajustar bien la válvula antirretorno al terminal luer macho del catéter BIA.

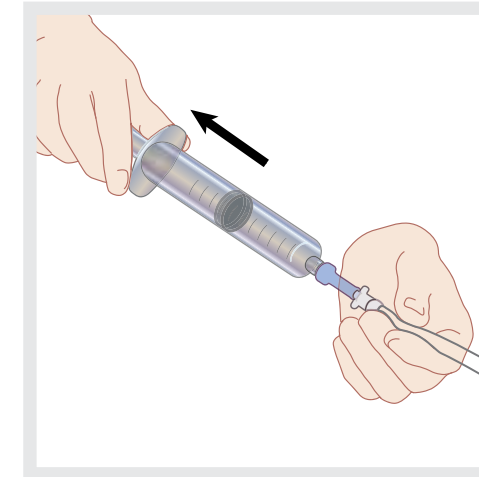


**5** Aplique 30ml de vacío utilizando la jeringa de 30ml que se suministra.

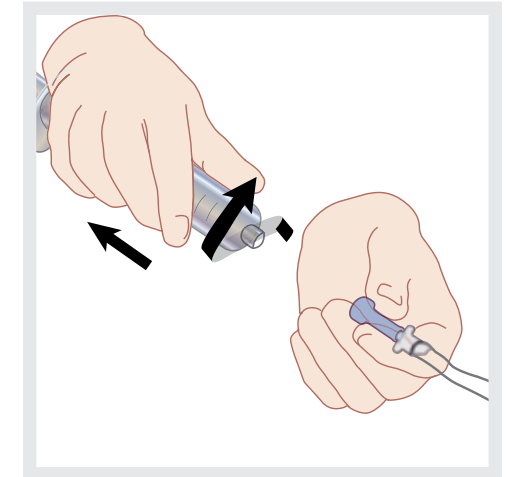


**6** Gire y extraiga la jeringa, manteniendo la válvula antirretorno acoplada al terminal luer macho del catéter BIA.


### INSTRUCCIONES PARA LA INSERCIÓN SIN VAINA

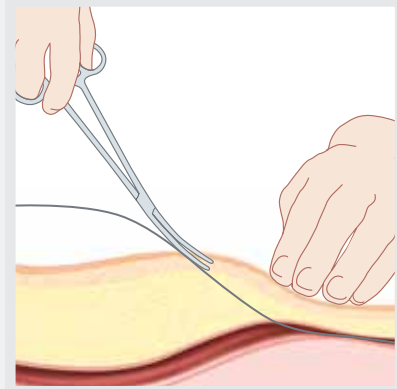


**7** Extienda con cuidado el tejido subcutáneo para facilitar la inserción sin vaina.

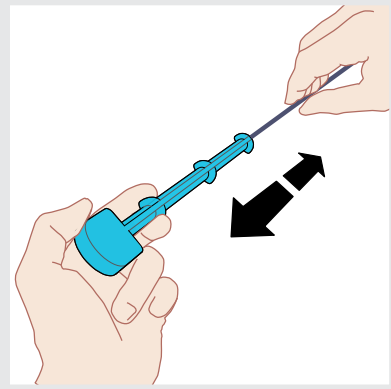

**8** Extraiga el catéter BIA del mando en T tirando RECTO para evitar dañarlo.

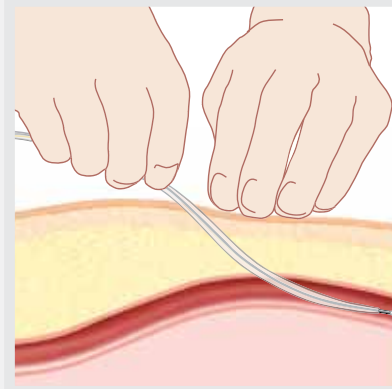


**9** Haga avanzar el catéter BIA por la guía hacia la arteria mediante movimientos cortos hasta que quede correctamente colocado.

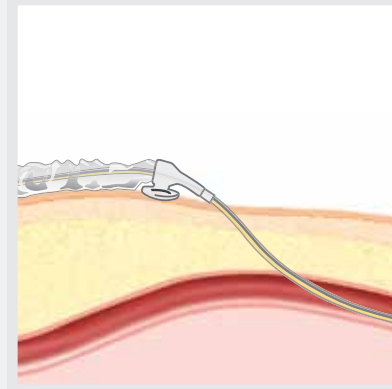


**10** Haga avanzar el obturador de la vaina lo más cerca posible del lugar de la inserción y sujete el catéter BIA a la pierna del paciente.


### INSTRUCCIONES PARA LA INSERCIÓN CON VAINA

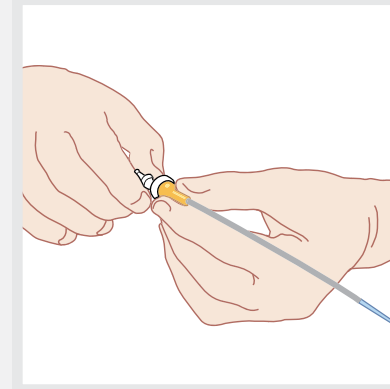


**7** Introduzca el dilatador en el conector de la vaina y fíjelo.

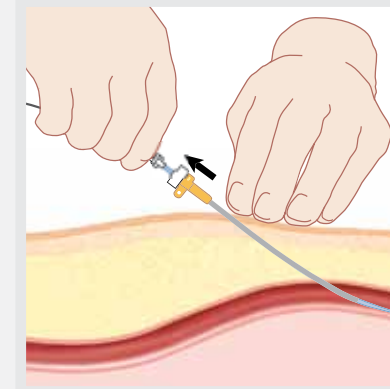

**8** Haga avanzar la vaina por la guía hasta la arteria realizando un movimiento giratorio. Retire el dilatador dejando colocada la vaina.

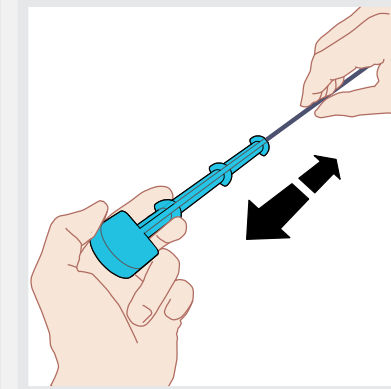


**9** Extraiga el catéter BIA del mando en T tirando RECTO para evitar dañarlo.

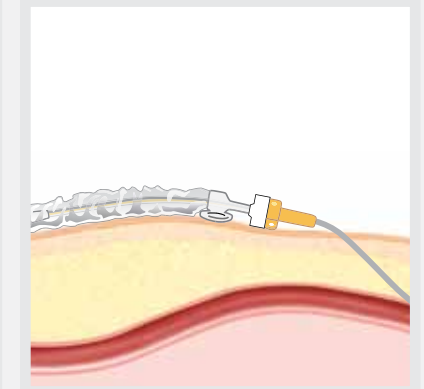


**10** Haga avanzar el catéter BIA en movimientos cortos por la vaina hacia la arteria hasta que quede correctamente colocado. Empuje el obturador de la vaina hacia el conector de la vaina y sujete el catéter BIA a la pierna del paciente.


### PREPARACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN

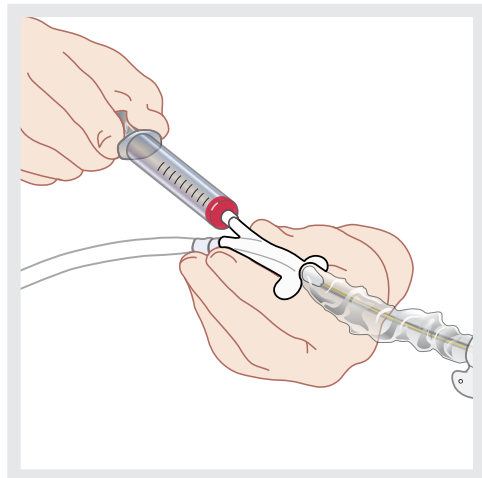

**11** Retire la guía y aspire 3ml de sangre del lumen interno.

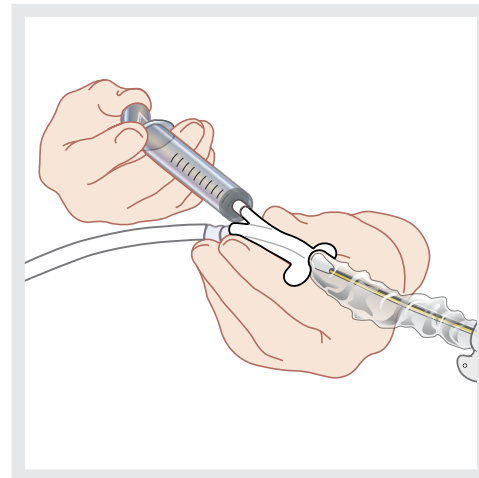


**12** Limpie manualmente el lumen interno con 3-5ml de solución de lavado.

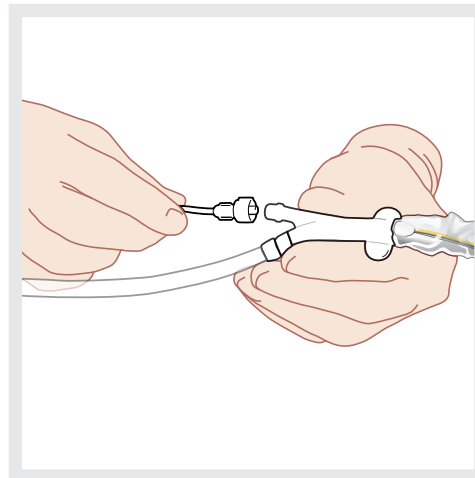


**13** Conecte un aparato de monitorización de presión arterial estándar.


### CONEXIÓN AL CATÉTER BIA

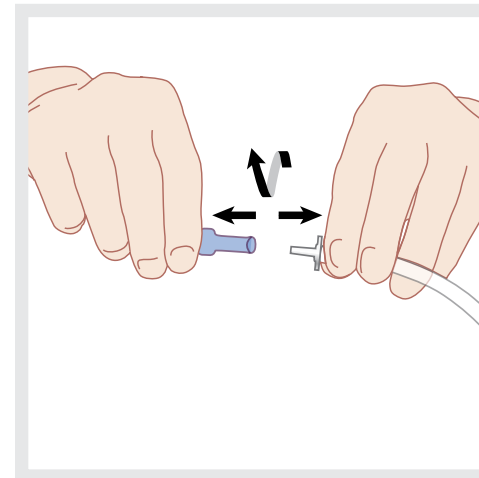

**14** Gire y tire para extraer la válvula antirretorno del catéter BIA.

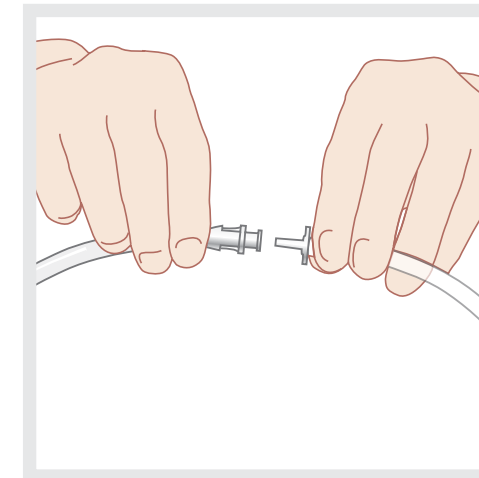

**15** Conecte el terminal luer macho del catéter BIA al terminal luer hembra de la alargadera.

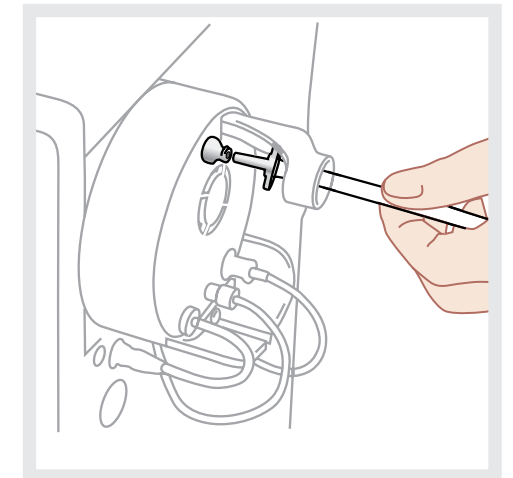

**16** Conecte el terminal luer macho de la alargadera al disco de seguridad del contrapulsador del balón intra-aórtico.

### DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL BALÓN INTRA-AÓRTICO

Esta guía está destinada a su consulta por personal formado sobre el uso de catéteres BIA MAQUET. No utilice esta guía hasta haber leído detenidamente las instrucciones de uso suministradas.

**Nota:** Esta información solamente deberá utilizarse como guía. Deberán tenerse en consideración la información clínica y factores del paciente como la longitud del torso para seleccionar un tamaño adecuado del balón.

