

**MEMBRANA DE DURETHAN DE LOS BIA  
SENSATION® 7Fr., LINEAR® 7,5Fr. y  
MEGA™ 8Fr. 50ml**

CARDIOVASCULAR


**Hemos creado la membrana de Durethan para que pueda resistir hasta en los pacientes más complicados.** Es más resistente, duradera e incluso delgada que cualquier membrana de BIA anterior.

El material de poliuretano moldeado mediante soplado de Durethan patentado se ha desarrollado para resistir una abrasión constante incluso en las aortas más calcificadas. No obstante, es tan delgado que nos permite producir catéteres mucho menos invasivos.

**La membrana de primera calidad  
Durethan ofrece un mayor rendimiento\*:**

- Resistencia a la abrasión mejorada en un 43 %
- Mayor resistencia a la fatiga
- Inflado inmediato desde el principio
- Menor resistencia a la inserción

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN\* EN DISTINTAS MEMBRANAS




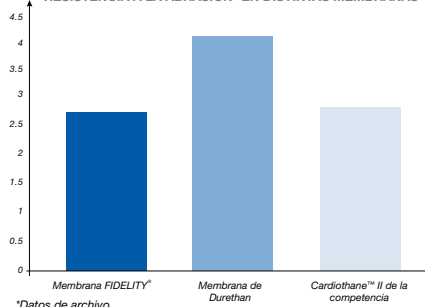


# CONSEJOS TÉCNICOS PARA LA MEMBRANA DEL BIA DE DURETHAN

## DISPONIBLE CON BIA SENSATION 7Fr., LINEAR 7,5Fr. y MEGA 8Fr. de 50ml

### La membrana se manipula y se presenta de modo distinto:

- Utilice solamente el dilatador y la vaina que se incluyen en el estuche de inserción
- Realice una preaplicación del balón y mantenga el vacío dejando colocada la válvula antirretorno después de haber introducido el catéter
- Mantenga el balón en el mango en T hasta que esté preparado para introducir el catéter a través de la guía
- NO humedezca, frote o manipule la membrana antes de insertarla
- NO retuerza el catéter durante la inserción
- Avance siempre en MOVIMIENTOS CORTOS y continuos de unos 2,5cm (1 pulgada) (lo más cerca posible del lugar de la inserción) para evitar retorcer el catéter BIA

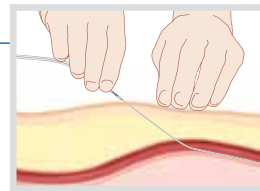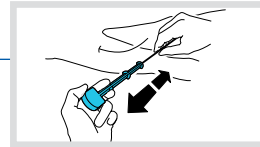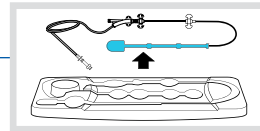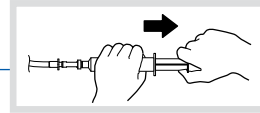

# MAQUET

GETINGE GROUP

Datascope Corp.  
Cardiac Assist Division  
15 Law Drive  
Fairfield, NJ 07004  
Teléfono: +1 973 244 6100

### Para contacto local:

Visite nuestro sitio web  
<http://ca.maquet.com>